

Evaluación corporal

Define el perfil de la zona periestomal de tu paciente como parte de tu evaluación holística.

Nombre del paciente:	<input type="text"/>	N.º de historial del paciente:	<input type="text"/>
Nombre del personal de enfermería:	<input type="text"/>	Hospital:	<input type="text"/>
		Fecha:	<input type="text"/>

1	La forma del área alrededor del estoma La forma puede cambiar al sentarse, acostarse o moverse.	Normal	La zona está más o menos nivelada con el abdomen, aunque la superficie de la piel puede ser irregular.
		Invaginada	Se hunde en el abdomen creando un hueco.
		Eventrada	Sobresale del abdomen creando un pico.

Normal (regular)



Invaginada



Eventrada



2	La forma que se ha seleccionado es uniforme o desigual	Uniforme	La forma es uniforme en la zona del estoma.
		Desigual	La forma no es uniforme en la zona del estoma.

Normal
Uniforme



Desigual



Invaginada
Uniforme



Desigual



Eventrada
Uniforme



Desigual



3	Abdomen blando o rígido	Blando	La zona cede a la presión (como cuando se presiona un colchón de agua).
		Rígido	La zona resiste la presión (como cuando se presiona el talón).

Abdomen blando



Abdomen rígido



4	Pliegues superficiales o profundos	Superficiales	La piel tiene líneas, surcos o arrugas.
		Profundos	La zona tiene pliegues profundos de piel suelta o exceso de grasa.

Pliegues superficiales



Pliegues profundos



5	Ubicación del estoma	Por encima de la línea de flexión abdominal	El estoma está situado cerca de las costillas.
		En la línea de flexión abdominal	El estoma está situado en los pliegues del abdomen.
		Por debajo de la línea de flexión abdominal	El estoma está situado por debajo de la línea de flexión abdominal.
	Por encima de la línea de flexión abdominal	En la línea de flexión abdominal	Por debajo de la línea de flexión abdominal
			

6	Ubicación de la apertura del estoma	Por encima de la superficie de la piel	El estoma sobresale de la superficie de la piel.
		Al nivel de la superficie de la piel	El estoma está al nivel de la superficie de la piel.
		Por debajo de la superficie de la piel	El estoma está por debajo de la superficie de la piel.
	Apertura del estoma por encima de la superficie de la piel	Apertura del estoma al nivel de la superficie de la piel	Apertura del estoma por debajo de la superficie de la piel
			

7	Tipo de efluente	Heces espesas	
		Heces líquidas	
		Orina	

Cuestiones clave

Solución de ostomía recomendada

Forma del adhesivo		Sistema de bolsas		Tipo de bolsa	
Plano		1 pieza		Abierta	
Convexo extra ligero	Convexo medido	2 piezas (acople adhesivo)		Cerrada	
Convexo ligero	Convexo fuerte	3 piezas (acople mecánico)		Válvula de vaciado	

Productos de apoyo



Si tienes alguna duda, ponte en contacto con tu responsable local de Coloplast.