

Biatain® Super, Adhesive

Biatain® Super, Non-Adhesive



Pansement hydrocapillaire adhésif

Pansement hydrocapillaire non adhésif



Mode d'emploi

Veillez lire attentivement les instructions suivantes.

23342307 Version 1

Le logo Coloplast est une marque déposée de Coloplast A/S.

Tous droits réservés. © 2024-12-10

Finalité prévue

Le produit est un pansement hydrocapillaire stérile, à usage unique, destiné au traitement des plaies humides et à l'absorption de l'exsudat.

Ce produit est destiné à être utilisé par les professionnels de santé et les patients sous la supervision de professionnels de santé.

Indications

Biatain Super adhésif

- est indiqué pour une large gamme de plaies faiblement à fortement exsudatives. Cela inclut les plaies aiguës comme les brûlures au second degré, les plaies postopératoires et les abrasions cutanées, ainsi que les plaies chroniques comme les ulcères de jambe et les escarres.

Biatain Super non adhésif

- est indiqué pour une large gamme de plaies faiblement à fortement exsudatives. Cela inclut les plaies aiguës comme les brûlures au second degré, les plaies postopératoires et les abrasions cutanées, ainsi que les plaies chroniques comme les ulcères de jambe et les ulcères du pied diabétique non infectés.

Mises en garde

Ne pas réutiliser le produit à usage unique, car une contamination croisée pourrait se produire, entraînant potentiellement une infection.

Le retraitement, le nettoyage, la désinfection et/ou la stérilisation peuvent compromettre les caractéristiques du produit et créer un risque supplémentaire de dommages corporels ou d'infection chez l'utilisateur.

Un professionnel de santé doit examiner et traiter régulièrement les plaies infectées, les plaies diabétiques et les plaies qui sont causées, en tout ou partie, par une insuffisance artérielle, conformément à la législation en vigueur.

Ne pas utiliser le produit avec un hydrogel sur une nécrose sèche à cause du risque potentiel de séchage de l'hydrogel. Cela pourrait entraîner une détérioration de la plaie.

Ne découpez pas le produit et n'utilisez pas le produit s'il est autrement endommagé, car cela pourrait entraîner une détérioration de la plaie en raison de résidus de produit laissés dans la plaie.

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé, car la stérilité du produit peut être compromise, ce qui peut potentiellement entraîner une infection.

Le produit ne doit pas être utilisé chez les patients présentant une sensibilité connue à la carboxyméthylcellulose (CMC), car une telle sensibilité pourrait entraîner une réaction allergique.

Le produit n'est pas fabriqué à base de latex de caoutchouc naturel, toutefois une rare contamination avec des traces de latex de caoutchouc naturel pendant la fabrication ou l'emballage peut survenir, entraînant potentiellement des réactions allergiques chez les patients présentant des allergies connues ou suspectées au latex de caoutchouc naturel.

Description du produit

Le produit est un pansement hydrocapillaire absorbant, stérile, à usage unique, avec un contour adhésif hydrocolloïde (Biatain Super adhésif) ou un contour non adhésif (Biatain Super non adhésif).

Ce pansement :

- peut être appliqué à des patients qui sont traités pour une infection locale ou systémique (à la discrétion du professionnel de santé)
- est compatible avec une compressothérapie
- peut être laissé en place jusqu'à 7 jours en fonction de la quantité d'exsudat, de l'état du pansement et du type de plaie
- peut être utilisé pendant toute la phase de cicatrisation pour protéger les types de plaie indiqués

Biatain Super adhésif est adapté à une utilisation chez des patients dont la peau périlésionnelle est saine dans le cas où une adhérence supplémentaire est nécessaire pour maintenir le pansement en place.

Biatain Super non adhésif convient à une utilisation sur les peaux fragiles en raison de l'absence d'adhésif.

Composition de Biatain Super adhésif:

- un film externe perméable à la vapeur mais imperméable aux bactéries et à l'eau
- un tampon absorbant (couche hydrocapillaire).
- une couche de contact avec la plaie
- un adhésif hydrocolloïde
- feuillets protecteurs

Composition de Biatain Super non adhésif:

- un film externe perméable à la vapeur mais imperméable aux bactéries et à l'eau
- un tampon super-absorbant (couche hydrocapillaire)
- une couche de contact avec la plaie
- une membrane hydrocolloïde
- une couche de protection cutanée microporeuse non tissée

Stérilisé par irradiation (R).

Les effets secondaires possibles liés à l'utilisation des pansements de plaies peuvent inclure : irritation/inflammation cutanée, réaction allergique cutanée, macération, douleur, hypergranulation et formation de cloques.

Coloplast décline toute responsabilité quant aux blessures et aux préjudices qui résulteraient d'un emploi de ce produit d'une manière non conforme aux recommandations de Coloplast.

Conditions de stockage

Conserver à l'abri du rayonnement solaire et de la chaleur.

Conserver en position horizontale.

Mode d'utilisation

Préparation

Nettoyez la plaie et la peau périlésionnelle conformément aux directives locales, p. ex. avec de l'eau stérile ou du sérum physiologique.

Séchez délicatement la peau périlésionnelle.

Si un film, une crème, une pommade ou un produit de ce type est utilisé, laissez sécher la peau périlésionnelle avant d'appliquer le produit.

Application


Sélectionner un pansement dont le tampon absorbant déborde d'au moins 1-2 centimètres des bords de la plaie.

Veillez à manipuler le produit de manière aseptique pendant l'application.

Ouvrez la pochette et retirez le pansement de l'emballage.

Biatain Super adhésif

Utilisez les feuillets protecteurs pour éviter de toucher la couche de contact avec la plaie ainsi que l'adhésif pendant l'application.

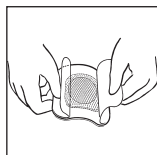


Retirez d'abord le plus grand feuillet protecteur et orientez la couche de contact avec la plaie vers la plaie. Enfin, retirez le feuillet protecteur restant.

Passer doucement les doigts autour du bord du produit pour vérifier qu'il adhère correctement et régulièrement à la peau.

Biatain Super non adhésif

Évitez de toucher la couche de contact avec la plaie pendant l'application.

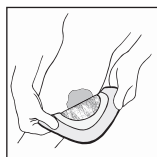


Orientez la couche de contact avec la plaie vers la plaie.

Un pansement secondaire est nécessaire pour la fixation. Ne recouvrez pas la totalité du produit avec un pansement secondaire occlusif.

Retrait

Le produit doit être remplacé lorsque c'est cliniquement indiqué ou lorsque le tampon absorbant est saturé d'exsudat, ou au bout de 7 jours.

Biatain Super adhésif

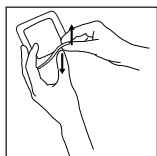

Découlez légèrement et retirez le contour adhésif en appuyant sur la peau pour l'écarter du pansement plutôt que de tirer sur le pansement. Si le produit est difficile à retirer, il doit être humidifié à l'eau ou au sérum physiologique jusqu'à ce qu'il devienne facile à retirer.

Biatain Super non adhésif

Retirez délicatement le pansement/la fixation secondaire avant d'enlever délicatement le produit de la plaie. Si le produit est difficile à retirer, il doit être humidifié à l'eau stérile ou au sérum physiologique jusqu'à ce qu'il devienne facile à retirer.

Élimination

Le produit est destiné à un usage unique exclusivement et doit être éliminé conformément aux directives locales, p. ex. avec les déchets ménagers normaux.

Ne pas jeter le produit dans les toilettes.

Signalement des incidents

Si un incident grave venait à se produire pendant l'utilisation de ce dispositif ou comme conséquence de son utilisation, en informer le fabricant ainsi que votre autorité nationale.

Explication des symboles



Dispositif médical



Indique que le produit est conforme à la législation européenne concernant les dispositifs médicaux



N° de référence



Date de péremption (AAAA-MM-JJ)



Code de lot



Date de fabrication (AAAA-MM-JJ)



Fabricant



Consulter le mode d'emploi



Ne pas réutiliser



Stérilisé par irradiation



Système à barrière unique stérile



N'est pas fabriqué à base de latex de caoutchouc naturel



Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé et consulter le mode d'emploi



Présente un support qui contient le numéro d'identification unique du dispositif



(Global Trade Item Number) Code article international



Conserver à l'abri du rayonnement solaire et de la chaleur



Haut



Emballage recyclable



Compatible avec l'IRM



Capacité d'absorption